

**Nouveau**

# DreamWear

Conçu pour oublier  
que l'on porte un masque



**PHILIPS**

# Guide de mise en place du masque DreamWear



## Gabarit

Utiliser le gabarit pour connaître la bonne taille de coussin : S, M, L, MW.



## Coussin

Le coussin doit-être positionné sous le nez, juste posé sur les narines.



## Mise en place

Positionner le coussin en-dessous du nez.



## Conduit

Installer le conduit au-dessus la tête.



## Harnais

Positionnez le harnais vers le bas de la tête, ajustez-le si nécessaire sans le serrer trop fort.



## Confort

Le conduit doit être positionné entre l'oreille et l'oeil. Si le conduit est trop proche des oreilles, le patient a besoin d'une taille plus petite (SM).  
Si le conduit est trop proche des yeux, le patient a besoin d'une taille plus grande (LG).

# Nouveau masque DreamWear

## Design élégant

Fuite intentionnelle au-dessus de la tête, pas de gêne pour le conjoint.

## Prévention des marques rouges

Conduit d'air très léger en silicone.

## Réduit les irritations

Mini coussin nasal.



## Plus de liberté de mouvement

Circuit révolutionnaire situé en haut de la tête.

## Meilleure stabilité

Harnais antidérapant.

DreamWear est un masque à contact minimal, destiné à servir d'interface pour l'application d'un traitement par PPC ou à deux niveaux de pression au cours d'un traitement contre l'insuffisance respiratoire ou l'apnée obstructive du sommeil. Ce dispositif fait l'objet d'un remboursement par les organismes d'assurance maladie dans certaines conditions : consulter la LPPR. Ce dispositif de classe IIa est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation le marquage CE dont l'évaluation de conformité a été réalisée par TÜV. Lire attentivement le manuel de l'utilisateur fourni avec le dispositif, pour une utilisation en toute sécurité.

Fabricant : Philips - 1001 Murry Ridge Lane - Murrysville - PA 15668 - États-UnisMandataire Européen (EC REP) : Respironics Deutschland - Gewerbestrasse 17 - 82211 Herrsching - AllemagneDate de création : 01/01/2016

