

Conseils d'entretien de votre dispositif médical.

Prolongez la vie des composants de votre appareil grâce à une maintenance adaptée.



Instructions de nettoyage des appareils respiratoires Philips.

Il est important de nettoyer votre appareil comme indiqué dans la notice d'utilisation de l'appareil. Un entretien insuffisant peut non seulement nuire à l'efficacité de votre appareil mais également l'endommager.



Important! N'utilisez jamais d'alcool ou de solutions de nettoyage sur votre masque, les coussins nasaux ou les circuits. Vous risqueriez de les endommager. Utilisez uniquement de l'eau chaude savonneuse.

Nettoyage quotidien

- **Masque:** Détachez le masque/les coussins nasaux du harnais. Procédez au nettoyage en utilisant de l'eau chaude savonneuse. Rincez. Laissez sécher à l'air libre.
- **Circuits:** Lavez-les dans de l'eau chaude savonneuse, puis rincez-les et laissez les sécher à l'air libre.
- **Humidificateur:** Videz l'humidificateur et laissez-le sécher à l'air libre. Changez l'eau dans l'humidificateur. Utilisez exclusivement de l'eau distillée pour remplir l'humidificateur afin d'éviter la formation de calcaire.

Nettoyage hebdomadaire

- **Filtre:** Nettoyez le filtre gris/noir en mousse de votre appareil avec de l'eau chaude savonneuse. Rincez. Laissez-le sécher. Remettez-le en place.
- **Harnais:** Lavez le harnais à la main avec de l'eau chaude savonneuse. Rincez-le et laissez-le sécher à l'air libre.
- **Humidificateur:** Nettoyez la chambre d'humidification avec du vinaigre blanc afin de prévenir l'apparition de moisissures. Il est impératif de nettoyer minutieusement l'humidificateur avec de l'eau stérilisée ou distillée avant de l'utiliser.

Nettoyage mensuel

- **Filtre:** Remplacez le filtre blanc à usage unique (le cas échéant).