

Comment nettoyer mon masque ?



Remarques générales :

Cette notice explicative ne remplace pas les modes d'emploi disponibles pour chaque produit.

** Les matériaux utilisés pour la fabrication des masques s'usent plus rapidement, s'ils sont par exemple nettoyés avec des détergents agressifs. Dans certains cas, il est donc fortement recommandé de changer régulièrement de masque.

** 25 cycles de nettoyage max.

*** Le nombre de 30 cycles a été validé par Weinmann avec l'appareil à ultrasons HAHN & KOLB type USR 58/H.

Le nettoyage par ultrasons doit être effectué à 80 °C maximum pour une durée maximale de 10 minutes.

Après avoir nettoyé les pièces, les rincer soigneusement à l'eau claire aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur puis les sécher.



Allemagne

Weinmann Geräte für Medizin GmbH+Co.KG
B.P. 540268 ■ 22502 Hamburg
Kronsaalsweg 40 ■ 22525 Hamburg


E: info@weinmann-medical.com
weinmann-medical.com
T: +49- 40-5 47 02-0 Réception
F: +49- 40-5 47 02-461 Réception
T: +49- 40-5 47 02-102 International Sales

Suisse

G. Weinmann AG – Neuenhof
T: +41- 56-416 41 11
www.weinmann.ch

France

Weinmann S.A.S. – Paris-Igny
T: +33-1-69 35 53 20
www.weinmann-france.fr

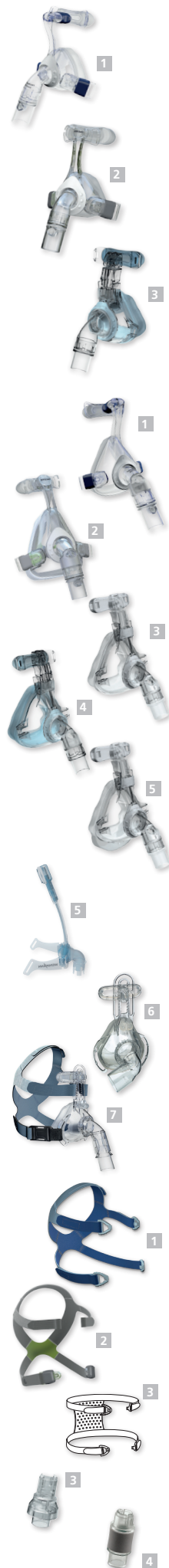

Produit	Cycle de nettoyage	Durée d'utilisation	Pièces	à la main dans de l'eau chaude avec un nettoyant ménager doux	lave-vaisselle jusqu'à 65 °C	lave-linge jusqu'à 30 °C	Bain à ultrasons*** jusqu'à 80°C (hebdomadaire)
1 JOYCEeasy	quotidien	jusqu'à 12 mois*	lot d'attaches	✓	✓	✓	✓
2 JOYCEone			lot d'attaches Easy/One	✓	✓	✓	✓
JOYCE (sans ill.)			douille rotative	✓	✓	-	✓
JOYCE 40 hPa			coque du masque	✓	✓	-	✓
JOYCE NV			coque du masque Easy/One	✓	✓	-	✓
JOYCE NV 40 hPa			jupe du masque	✓	✓	-	✓
3 JOYCE SilkGel			jupe du masque Easy/One	✓	✓	-	✓
JOYCE SilkGel NV			jupe du masque SilkGel	✓	✓	-	-
JOYCE GEL (sans ill.)			jupe du masqueGEL	✓	✓	-	-
JOYCE GEL NV			anneau de sécurité	✓	✓	-	✓
			coussinet frontal	✓	✓	-	✓
			coussinet frontal Easy/One	✓	✓	-	✓
			coussinet frontalSilkGel	✓	✓	-	-
			coussinet frontal GEL	✓	✓**	-	-
			cale frontale	✓	✓	-	✓
			bouchon de raccord	✓	✓	-	✓
			raccord coudé	✓	✓	-	✓
1 JOYCEeasy Full Face	quotidien	jusqu'à 12 mois*	lot d'attaches	✓	✓	✓	✓
2 JOYCEone Full Face			lot d'attaches Easy/One	✓	✓	✓	✓
3 JOYCE Full Face			douille rotative	✓	✓	-	✓
JOYCE Full Face 40 hPa			coque du masque	✓	✓	-	✓
JOYCE Full Face NV 40 hPa			coque du masque Easy/One	✓	✓	-	✓
4 JOYCE Full Face SilkGel			jupe du masque	✓	✓	-	✓
JOYCE Full Face SilkGel NV			jupe du masque Easy/One	✓	✓	-	✓
JOYCE Full Face SilkGel NV			jupe du masque SilkGel	✓	✓	-	-
JOYCE Full Face GEL (sans ill.)			jupe du masque GEL	✓	✓	-	-
JOYCE Full Face GEL NV			Valve d'expiration d'urgence	✓	-	-	✓
5 JOYCE Full Face ^{plus}			Sangle d'ouverture rapide	✓	-	✓	✓
			anneau de sécurité	✓	✓	-	✓
			coussinet frontal	✓	✓	-	✓
			coussinet frontal Easy/One	✓	✓	-	✓
			coussinet frontal SilkGel	✓	✓	-	-
			coussinet frontal GEL	✓	✓**	-	-
			cale frontale	✓	✓	-	✓
			bouchon de raccord	✓	✓	-	✓
			raccord coudé	✓	✓	-	✓
5 NP 15	quotidien	jusqu'à 12 mois*	lot d'attaches	✓	✓	-	✓
			douille rotative	✓	✓	-	✓
			coque du masque	✓	✓	-	✓
			tuyau du masque	✓	✓	-	✓
			bulle narinaire	✓	✓	-	✓
			clip attache-tuyau	✓	✓	-	✓
			boucle attache-tuyau	✓	-	-	-
			coussinet frontal	✓	✓	-	✓
			bouchon de raccord	✓	✓	-	✓
			raccord coudé	✓	✓	-	✓
1 WEINMANNstrap	hebdomadaire	6 à 12 mois	harnais	✓	-	-	-
2 Harnais JOYCEone			harnais	✓	-	-	-
HEADstrap (sans ill.)			harnais	✓	-	-	-
3 JOYCEstrap/SOMNOstrap			harnais	✓	-	✓	-
NP 15 harnais (sans ill.)			Harnais	✓	-	-	-
3 Silentflow 2	quotidien	6 à 12 mois	raccord manchon	✓	✓	-	✓
			partie centrale	✓	✓	-	✓
4 Silencieux	quotidien	3 à 6 mois	manchon		nur ohne Spülmittel	-	✓
			filtre poreux			-	✓
			élément de jonction			-	✓

* cf. < Remarques générales >

** cf. < Remarques générales >

*** cf. < Remarques générales >