

RESMED

Bienvenue dans le monde de Pixi

Votre guide pour un traitement
adapté aux besoins de votre enfant



Pixi™
MASQUE PÉDIATRIQUE

Bienvenue dans le monde de Pixi

Il est tout à fait normal de vous inquiéter à propos de la mise en place du traitement de votre enfant. ResMed désire vous rassurer en vous accompagnant. Vous trouverez dans cette brochure des informations, des explications et un soutien pour que le traitement soit le plus doux et le plus facile possible pour votre enfant et vous-même. Des milliers d'autres enfants doivent porter un masque pendant la nuit.



Le masque pédiatrique Pixi a été conçu par une équipe de personnes dévouées, conscientes de l'importance que vous accordez à la santé et au bien-être de votre enfant. Le Pixi n'est pas une version réduite d'un masque pour adulte ; il a été conçu pour les enfants de 2 à 7 ans, en tenant compte de leur sensibilité cutanée, de leurs caractéristiques faciales et de leur structure osseuse.



Étape par étape

Tout comme les adultes, les enfants peuvent être initialement réticents à l'idée de quelque chose de nouveau.

Nous proposons quelques astuces à mettre en œuvre pour habituer progressivement votre enfant à son masque Pixi et au traitement.

Remarque : Il s'agit de recommandations générales qui ne conviennent pas forcément à toutes les familles et à tous les enfants.

N'hésitez pas à essayer d'autres méthodes/astuces.





Faites la connaissance de Pixi

- ★ Consacrez un peu de temps à expliquer à votre enfant (quel que soit son âge) de quoi il s'agit. Les enfants comprennent les explications bien mieux qu'on ne le pense généralement. Tout comme vous expliqueriez à votre enfant pourquoi il doit prendre un bain ou manger le plat principal avant le dessert, expliquez-lui à quoi sert le masque, pourquoi il doit le porter.
- ★ Si vous avez d'autres enfants plus âgés, donnez-leur un rôle à jouer dans le traitement. De cette manière, ils se sentent impliqués dans le traitement de leur frère ou sœur, et cela peut aussi aider votre enfant à accepter son traitement. Les jeunes enfants adorent imiter leurs aînés !
- ★ Donnez le masque à votre enfant et laissez-le le tenir, jouer avec, le manipuler, le jeter et le ramasser, en bref satisfaire toute sa curiosité. Cela l'aidera à se familiariser avec le masque et à dissiper toutes les inquiétudes initiales qu'il pourrait avoir à propos de Pixi, son nouveau compagnon.



Faites semblant

Placez le masque sur quelqu'un d'autre ou sur un objet comme son jouet favori, une peluche, ou même sur papa ou maman. Quand il porte le masque, l'enfant peut faire semblant d'être un astronaute comme Buzz l'Éclair ou un pilote de chasse. Votre enfant développera son propre jeu, et en stimulant son imagination, vous l'aidez à accepter l'idée de porter un masque.



Quand passe le marchand de sable

- ★ Quand vous pensez que votre enfant s'est bien familiarisé avec Pixi, vous pouvez l'appliquer sur son visage. Essayez de faire cela de la manière la plus calme et sereine possible, par exemple quand il est tranquille ou prêt pour une sieste.
- ★ Il est normal pour votre enfant, et pour vous-même, d'être un peu inquiet les premières fois qu'il se réveille avec le masque ; il peut se sentir légèrement désorienté ou même un peu effrayé.
- ★ Pour les premières nuits, il est conseillé de rester auprès de votre enfant jusqu'à ce qu'il s'endorme avec le masque, et d'être aussi présent lorsqu'il se réveille.
- ★ Votre soutien et votre présence à ces moments rassureront votre enfant jusqu'à ce qu'il soit habitué à porter le masque pour dormir et que le masque soit intégré dans la routine du coucher. "Bois ton lait, brosse-toi les dents, lis un livre, mets ton masque Pixi, puis fais dodo".





Harnais confortable en Breathoprene™

légèrement coloré pour être plus rassurant et discret sur le visage de l'enfant

Des stabilisateurs flexibles

permettent d'adapter le masque à la structure et à la forme spécifiques du visage de l'enfant pour un ajustement optimal

Bulle souple et confortable

La bulle en silicone mince réduit la pression sur le visage délicat des enfants, sans compromettre l'étanchéité

Deux positions du tuyau

Le tuyau peut être placé d'un côté ou de l'autre du coussinet, en fonction de la position de sommeil de l'enfant

Un clip à libération rapide

permet de faciliter le retrait du masque tout en conservant les réglages de harnais désirés

Technologie Spring-flex

Le tuyau s'étire et se plie facilement pour éviter de s'accrocher ou de traîner quand l'enfant bouge en dormant

Clip d'urgence

En cas d'urgence, vous pouvez ouvrir le clip encore plus rapidement en tirant fermement sur la sangle inférieure du harnais



Soyez tranquille

ResMed comprend vos inquiétudes relatives à la sécurité de votre enfant pendant le port du masque. Vous pouvez être assuré que la conception de chaque composant du masque pédiatrique Pixi a été pensée pour répondre aux inquiétudes des parents sur la sécurité et le confort.

★ **Face à face :**

Le masque Pixi couvre uniquement le nez de votre enfant ; il n'exerce donc aucune pression ou obstruction autour des yeux. Le visage reste le plus dégagé possible, ce qui est réconfortant pour lui comme pour vous.

★ **Sécurité avant tout :**

Toutes les attaches et les points de réglage du masque sont à l'écart du visage, ce qui permet de réduire le risque de manipulation des sangles par votre enfant.

Le masque est également exempt de petites pièces qui pourraient provoquer un étouffement ou des blessures. Tous les composants sont attachés au masque ; ils sont situés hors du passage du tuyau et n'obstruent pas le visage ou les yeux de votre enfant.

★ **Entendre votre enfant :**

Le masque a été conçu pour que vous puissiez entendre votre enfant s'il pleure la nuit, même quand le masque est en place sur son visage.

Pour votre tranquillité d'esprit, vous pouvez utiliser un babyphone dans la chambre de votre enfant ; de cette manière, vous pourrez entendre le moindre chuchotement qui pourrait indiquer qu'il a besoin de vous pendant la nuit.

*Bien que le masque ait été conçu pour la sécurité de votre enfant, il doit toujours être surveillé.
N'hésitez pas à contacter votre médecin pour lui faire part de toute éventuelle inquiétude.*

Les encouragements

- ★ Pour encourager les enfants plus âgés à poursuivre le port du masque nuit après nuit, il faut les féliciter et les soutenir régulièrement. Cela peut aller d'encouragements verbaux à de petits jeux, comme pour l'éducation à l'hygiène corporelle ou l'encouragement à participer aux tâches domestiques.
- ★ Vous pouvez par exemple afficher dans la chambre de votre enfant un simple tableau où il peut appliquer un autocollant pour chaque nuit de port du masque où il ne s'est pas plaint.
- ★ Vous pouvez établir un système où 10 autocollants donnent droit à une récompense.
- ★ Cela a pour but d'aider à maintenir l'observance du traitement, au bénéfice de la santé de votre enfant. Cela permet également de banaliser le traitement ; vous pouvez ainsi interagir avec votre enfant et vous détacher de temps en temps des aspects sérieux du traitement. Les enfants restent des enfants et adorent s'amuser.



N'abandonnez pas !

- ★ Nous comprenons que vous soyez tenté(e) d'abandonner le traitement si votre enfant éprouve des difficultés à porter le masque. Mais soyez patient pour que votre enfant aille mieux. Le traitement est exigeant même pour les adultes qui le suivent.
- ★ Le traitement peut améliorer la santé de votre enfant. Les efforts en valent la peine lorsqu'il s'agit de la santé et du comportement de votre enfant. Une réussite du traitement vous permettra de constater les améliorations suivantes :
 - ★ Votre enfant dormira mieux la nuit, ce qui est bon pour lui mais également pour vous ; vous pourrez ainsi prendre un peu de repos.
 - ★ Le comportement général de votre enfant va probablement s'améliorer. Si l'enfant ne bénéficie pas d'un sommeil de qualité, son organisme ne peut pas correctement se reposer, se reconstituer et récupérer. Il est alors grincheux et agité toute la journée. Avec l'amélioration du sommeil, vous constaterez que votre enfant est plus heureux tout au long de la journée... et ce sera pareil pour vous !
 - ★ Les résultats scolaires de votre enfant peuvent également s'améliorer grâce à la stabilisation du comportement en journée.
- ★ Cela peut prendre un certain temps avant que votre enfant se sente confiant et à l'aise avec le masque, ou même qu'il l'apprécie.
Assez rapidement, la plupart des enfants finissent par accepter le masque. Pixi devient le compagnon des enfants !

Pour tout soutien ou assistance supplémentaire, n'hésitez pas à contacter votre médecin ; il est disponible pour vous aider et pour faciliter le traitement de votre enfant.





Problèmes fréquents

Les problèmes les plus fréquents auxquels sont confrontés les parents lors du traitement de leur enfant sont le confort, la sécurité et l'hygiène.

Si vous rencontrez d'autres problèmes, veuillez contacter votre médecin ; il est disponible pour toute assistance dont vous pourriez avoir besoin.

Confort et sécurité

Si votre enfant a des marques sur le visage, il est possible que le harnais de son masque soit trop serré.

Le masque pédiatrique Pixi n'est pas la simple version réduite d'un masque pour adulte ; il a été spécifiquement conçu pour les visages des enfants, très différents des visages des adultes en termes de structure osseuse, de caractéristiques faciales et de sensibilité cutanée. La bulle est conçue pour répartir la pression de manière homogène ; elle comporte des points de pression peu nombreux et très doux pour le plus grand confort de l'enfant.

Si vous serrez le masque pour mieux le fixer sur le visage de votre enfant, il risque d'être trop serré et inconfortable.

Le masque Pixi a été conçu pour un port confortable sans être serré. Les appareils de traitement peuvent généralement détecter les fuites d'air au niveau du masque, et les compensent automatiquement. Il n'est donc pas nécessaire de serrer excessivement les sangles du masque pour tenter d'éviter des fuites.

Ces appareils de ventilation sont conçus pour gérer ce problème à votre place.

L'hygiène

Nous recommandons de démonter et de nettoyer régulièrement le masque de votre enfant afin de préserver ses performances ainsi que l'hygiène et la sécurité de votre enfant.

Veillez vous reporter au Guide d'utilisation du masque pédiatrique pour des instructions spécifiques sur le nettoyage et l'entretien du masque.



Nous espérons que les informations contenues dans cette brochure ont apaisé vos craintes sur la mise en place du traitement de votre enfant.

Pour toute question ou demande, n'hésitez pas à contacter votre médecin ; il vous fournira toute l'assistance nécessaire.

ResMed vous souhaite ainsi qu'à votre famille les meilleurs résultats thérapeutiques.



Donnez vie à Pixi !

Demandez à votre enfant de colorer Pixi comme il le désire !



Bonne nuit
dors bien
en pleine forme au réveil
dans la lumière du matin
pour vivre bien
avec le plein d'énergie



Pixi™
MASQUE PÉDIATRIQUE

 **ResMed Ltd**
1 Elizabeth Macarthur Drive
Bella Vista NSW 2153 Australie

Distribué par : ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA - **[CEI/REP]** ResMed (UK) Ltd 96 Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RY UK – ResMed SAS, Parc Technologique de Lyon, 292 allée Jacques Monod, 69791 Saint Priest Cedex, France. Veuillez consulter le site www.resmed.com pour obtenir les coordonnées d'autres bureaux ResMed dans le monde. Pixi est une marque commerciale de ResMed Ltd. Breathoprene est une marque commerciale d'AccuMED Technologies, Inc.

Pixi™ - Indications : Masque pédiatrique destiné à acheminer au patient de façon non-invasive le débit d'air produit par un appareil de pression positive continue (PPC) ou d'aide inspiratoire avec PEP (pression expiratoire positive). Utilisation chez les enfants de 2 à 7 ans à qui un traitement par pression positive continue (PPC) ou à deux niveaux de pression a été prescrit. Usage multiple par un seul patient à domicile ou en milieu hospitalier. - **Ce dispositif médical** est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. - **Bon usage :** Lire attentivement le manuel utilisateur fourni avec le dispositif.

Ce document ne saurait remplacer un avis médical, veuillez prendre contact avec votre médecin. © 2013 ResMed Ltd. 1014893/2 2013 04