

Votre humidificateur au quotidien

Chaque matin : videz l'eau restante et nettoyez l'intérieur du réservoir avec du liquide vaisselle ou du savon hypoallergénique (veillez à bien utiliser un détergent doux), puis rincez abondamment à l'eau claire. Laissez sécher le réservoir.

Chaque soir : remplissez votre réservoir d'eau du robinet ou de l'eau embouteillée (choisir une eau de source parmi les moins minéralisées). Portez l'eau à ébullition, puis laissez-la refroidir à température ambiante avant utilisation.

Remarque : n'utilisez en aucun cas de l'eau déminéralisée à usage ménager (eau destinée aux produits électroménagers).



Circuit chauffant ClimateLine Air™ (en option)

Cette option vous permet d'obtenir une température constante au niveau de votre nez quelles que soient les conditions extérieures.

Pour activer cette option, connectez le circuit chauffant ClimateLine Air à l'arrière de l'appareil et réglez la valeur de température entre 16° et 30°C dans votre menu « **Mes Options** ».




Comment régler votre humidificateur chauffant

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter notre site internet :

www.resmed.com

Ce feuillet d'information ne remplace pas les modes d'emploi détaillés et notices de nettoyage des produits cités.


Votre appareil AirSense10 a été configuré pour vos besoins par votre prestataire de santé. Vous pouvez cependant faire quelques ajustements pour rendre votre traitement plus confortable.

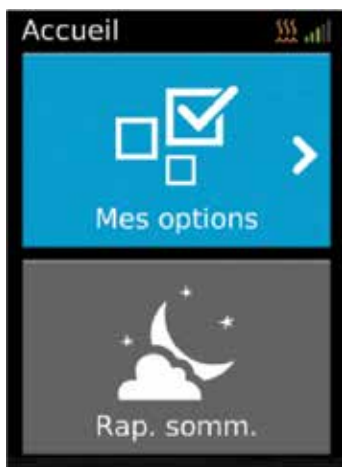

Sélectionnez « **Mes Options** » à l'aide de la molette de réglage.



Les réglages actuels s'affichent à l'écran.

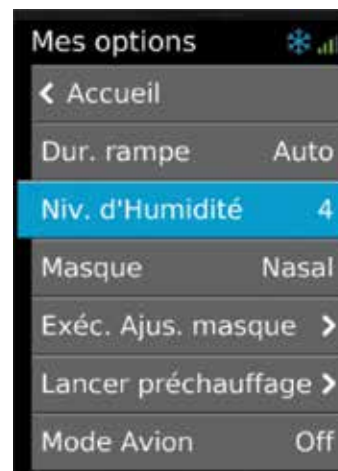

Dans « **Mes Options** », tournez la molette pour sélectionner « **Niv. d'humidité** » puis appuyez sur la molette.



Tournez la molette pour ajuster le niveau d'humidité et appuyez sur la molette pour valider le changement.

- ✓ **Augmentez le niveau d'humidification** si votre nez se dessèche.
- ✓ **Réduisez le niveau d'humidification** si vous avez le nez qui coule, ou si de la condensation apparaît dans votre masque ou votre circuit respiratoire.

Bouton Marche/Arrêt pour démarrer le traitement.



Molette de réglage pour accéder aux options et les modifier.

Bouton d'accueil pour revenir à l'écran d'accueil à tout moment.

Préchauffage de l'eau :

Cette fonction vous permet de préchauffer l'eau avant de démarrer l'appareil, afin que l'air ne soit pas froid ou sec au début de votre traitement.

Pour activer cette fonction, sélectionnez « **Lancer préchauffage** » à l'aide de la molette puis validez en appuyant sur « **Ok** ».

