

Vous souffrez de troubles respiratoires du sommeil et vous êtes équipé d'un appareil Löwenstein Medical Technology de la gamme prisma **doté d'un modem**.

Grâce à **my.prismacloud.com**, vous pouvez suivre votre traitement quotidiennement.


Ainsi, vous savez :

- Combien de temps vous avez utilisé votre appareil et si vous avez bien dormi,
- Si votre traitement est efficace et s'il corrige les événements respiratoires durant votre sommeil (apnées / hypopnées),
- Si vous ronflez toujours sous traitement,
- Si votre masque est bien ajusté (grâce à l'information concernant la fuite durant la nuit).


UNE CONNEXION EN 3 CLICS




Le numéro de série se trouve sur le côté droit de l'appareil.

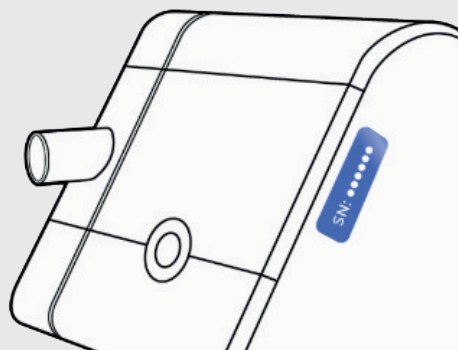

1. Ouvrir la page <https://my.prismacloud.com> (disponible sur tous supports : PC, tablettes, téléphones...)

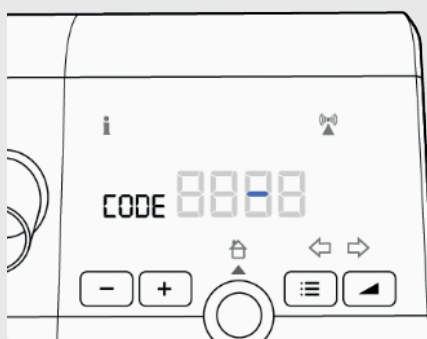

2. Se connecter à l'aide du numéro de série de l'appareil de thérapie et du code qui s'affiche dans le menu

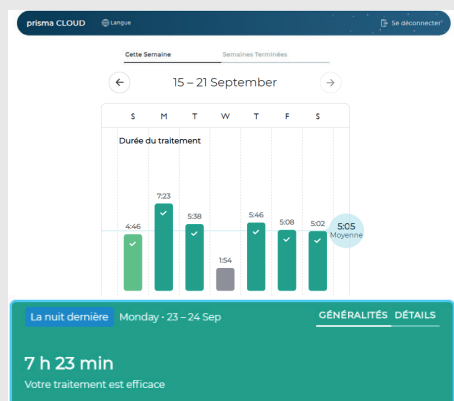

3. Vous êtes maintenant connecté

<https://my.prismacloud.com>



Garanties Löwenstein Medical avec prisma CLOUD :

Une connexion anonyme et sécurisée

Le respect de votre vie privée

Un serveur hébergé en France selon la norme ASIP santé

Mentions légales

my.prismacloud.com est un système en ligne d'exploitation des appareils de traitement Löwenstein Medical.

DM classe IIa - Marquage CE réalisé par TÜV Rheinland.

Fabricant : Löwenstein Medical Technology GmbH + Co. KG - Allemagne

Distributeur : Löwenstein Médical France S.A.S, Z.I 5 rue Lavoisier, 91430 Igny. T : +33(0)1 69 35 53 20

CE 0197

Avec prisma JOURNAL dormez-bien et restez informé !

Vous souffrez de troubles respiratoires du sommeil et vous êtes équipé d'un appareil Löwenstein Medical Technology de la gamme prisma et vous voulez **suivre votre traitement via la carte SD** de votre appareil de thérapie.

prisma JOURNAL vous assiste rapidement et facilement dans le suivi de votre traitement des apnées du sommeil.


Vous pouvez :

- Afficher vos données thérapeutiques d'une manière complète et compréhensible
- Obtenir des informations sur la qualité de votre sommeil
- Imprimer facilement ces informations afin d'échanger avec votre médecin


UNE CONNEXION EN 3 CLICS



1. Ouvrir la page <https://prismajournal.com>

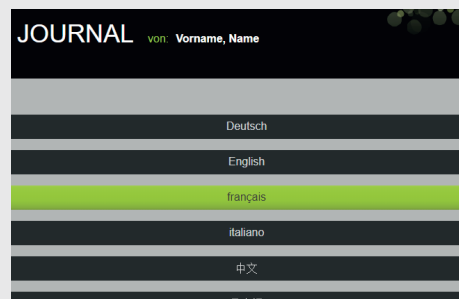

2. Sélectionner votre langue parmi les propositions

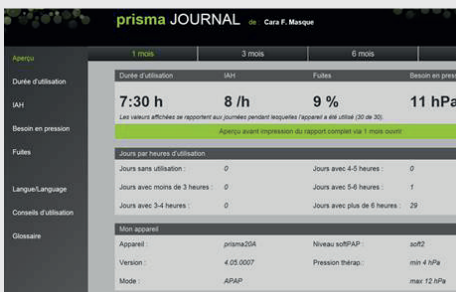

3. Insérer la carte SD de votre appareil de thérapie dans un lecteur connecté à votre PC et télécharger le fichier contenu sur votre carte SD.

Les informations relatives à votre traitement s'affichent.

Toutes les réponses à vos questions sont dans prisma JOURNAL

<https://prismajournal.com>



Garanties Löwenstein Medical avec **prisma JOURNAL** :

Vos données ne sont pas enregistrées sur Internet

Löwenstein Medical n'a pas accès à vos informations

Aucune condition d'utilisation intrusive n'est à accepter pour accéder à ce service