



## FICHE PRODUIT

# VELOX<sup>®</sup>

**NOUVEAU :**  
Nébulisation  
en - de 3 mn\* !



- **Une nébulisation en moins de 3 mn\* (pour 2.5 ml)** grâce à la technologie à tamis vibrant
- **Indication :** traitement des affections respiratoires chroniques (hors mucoviscidose)
- **Silence et discrétion remarquables**
- **Totalement autonome :** alimentation sur piles ou sur secteur
- **Petit et léger :** facile à transporter, idéal pour les voyages
- **Utilisation intuitive** pour enfants et adultes
- **Entretien simple :** petit nombre de composants


### CARACTÉRISTIQUES DE L' AÉROSOL PRODUIT\* :

**Temps d'inhalation :** moins de **3 minutes\*** (pour 2.5 ml)

**Quantité d'aérosol produit :** 0,80 ml

**MMAD :** 4,4  $\mu$ m

**Fraction respirable < 5  $\mu$ m :** 60%

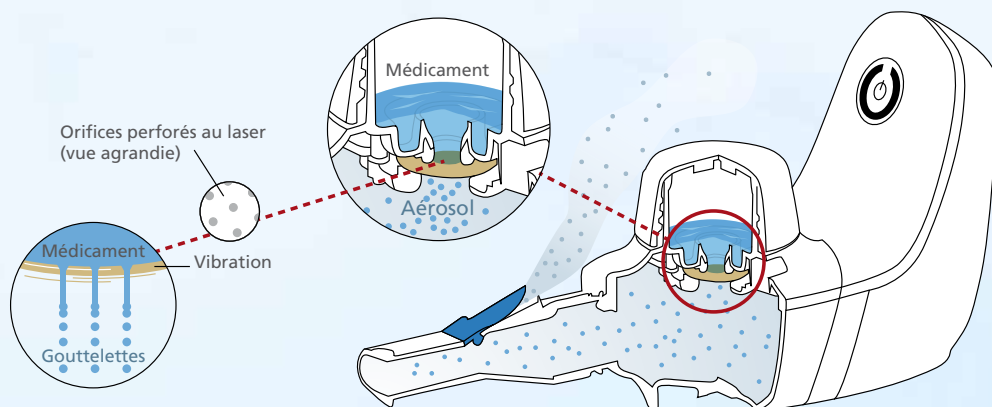

\*Mesures in vitro PARI PHARMA selon modalités normes NF EN 13544 pour 2,5 ml NaCl 0,9%

## Liste des composants :

- Générateur,
- Nébuliseur à tamis avec embout buccal,
- Bloc d'alimentation,
- Sacoche de transport,
- Dispositif de nettoyage du tamis (VELOXcare).



**Alimentation :** sur secteur : adaptateur multitenion (100-240V ~ / 50-60 Hz)

sur piles : 3 x 1,5 V AA LR6 / alcalines ou 3 x 1,2 V NiMH

Autonomie sur piles (piles neuves, rechargeables ou non, haute puissance) : **environ 4 heures.**

**Poids :** 110 g (sans les piles)  
140 g (avec les piles)

**Garantie :** 2 ans pour le générateur


**Ref. : 55G1006, Code ACL : 4260020436210**

## Mode de fonctionnement et granulométrie\*:

**VELOX, fabriqué par PARI GmbH, leader allemand dans l'aérosolthérapie<sup>1</sup>, est un système de nébulisation à tamis vibrant.**


- Le médicament liquide est projeté à travers un **tamis en acier inoxydable**, perforé de 3.000 micro-orifices, qui vibre à haute fréquence (160 KH).
- VELOX produit donc un **aérosol de granulométrie\*** bien **plus homogène** que les nébuliseurs pneumatiques : une plus grande partie des gouttelettes sont d'une taille optimisée pour la déposition pulmonaire. Avec une durée d'inhalation clairement réduite !

<sup>1</sup> Source : Insight Health

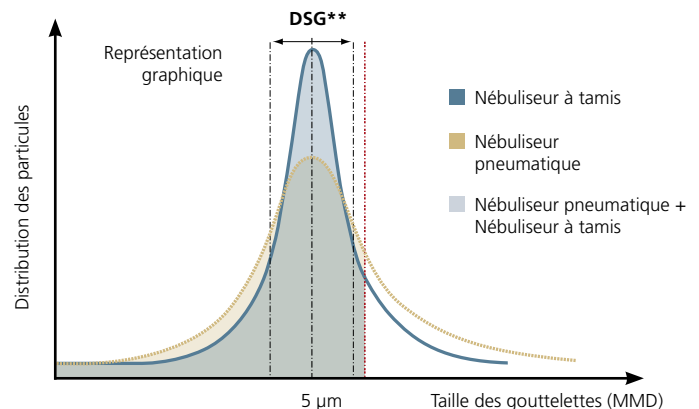

\*Mesure de la répartition par taille des particules d'un aérosol  
\*\*Déviation Standard Géométrique

## Performance de l'aérosol produit :

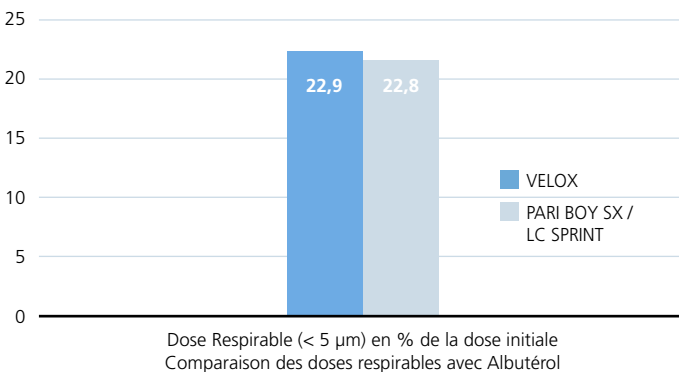

VELOX produit la **dose respirable** de médicament du couple de référence PARI BOY SX / LC SPRINT (voir graphique ci-contre) mais **beaucoup plus rapidement !**



**Temps d'inhalation (pour 2.5 ml) :**

VELOX : **moins de 3 mn**

PARI BOY SX / LC SPRINT : **environ 5 mn**

## Mentions obligatoires :

**VELOX®** est un dispositif médical de **classe IIa** fabriqué par PARI GmbH - **CE n° 0123**. Ce dispositif est destiné aux indications suivantes selon la LPP : « **Aérosolthérapie par nébulisation dans le traitement des affections respiratoires (hors mucoviscidose) pour l'administration de médicaments ayant reçu l'AMM pour cette voie d'administration** ». **VELOX®** est inscrit à la liste LPPR aux codes suivants: **1162590, 3140003, 1163939**. Lire attentivement la notice avant toute utilisation. Créé en 02/2017.



PARI PulmoMed SARL  
Z.A. du Petit Nanterre 11, avenue de l'île Saint-Martin  
92737 Nanterre Cedex  
Tél : 01 56 83 85 00 - Fax : 01 56 83 85 09  
e-mail: clients@pari-pulmomed.fr

www.pari.com