


L'inhalation avec VELOX®



1 Se laver soigneusement les mains avant chaque séance



2 En cas de fonctionnement sur piles (ou avec des piles rechargeables), les insérer avant de monter le nébuliseur.

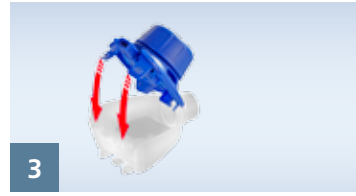

3 Placer le réservoir des médicaments contre la chambre du nébuliseur et fermer les attaches.



4 Relier le nébuliseur à l'unité de commande (la zone du connecteur doit être entièrement sèche). Fermer l'attache sur le dessous de l'appareil.




5 Monter l'embout buccal ou le masque sur le nébuliseur.



6 Dévisser le couvercle du réservoir des médicaments. Verser le médicament (min. 2 ml, max. 6 ml). Fermer le couvercle.



7 En cas de fonctionnement avec le bloc d'alimentation secteur, relier l'unité de commande avec le bloc d'alimentation secteur à la prise de courant adéquate.

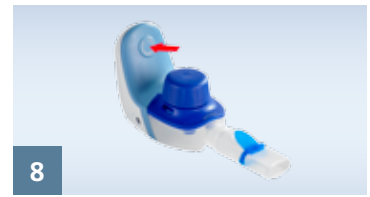

8 Se tenir bien droit, prendre une position détendue. Mettre l'appareil en marche. Un signal sonore retentit, le bouton marche/arrêt s'allume (vert). L'aérosol s'accumule dans le nébuliseur.



9a Tenir le VELOX à l'horizontale. Maintenir l'embout buccal entre les dents et serrer les lèvres autour de celui-ci.



9b Tenir le VELOX à l'horizontale. Le masque doit être mis en place sur le nez et la bouche en exerçant une légère pression (pas de fuite).



10 Inspirer et expirer lentement et profondément l'aérosol accumulé dans le nébuliseur. L'inhalation peut être arrêtée lorsque l'aérosol ne sort plus de la valve.



11 Eteindre l'appareil. Un signal sonore retentit, le bouton marche/arrêt s'éteint. Il est normal qu'une quantité résiduelle de médicament reste dans le nébuliseur.



12 Si fonctionnement avec le bloc d'alimentation secteur : débrancher le connecteur secteur.

Signaux de l'appareil

Mise en marche de l'appareil :	le bouton marche/arrêt s'allume (vert)	1 bip.
Pendant le fonctionnement :	le bouton marche/arrêt est allumé (vert)	
Niveau faible de la batterie :	le bouton marche/arrêt clignote (vert)	
Batterie vide/Tension trop faible :	le bouton marche/arrêt clignote trois fois (orange)	1 bip. L'appareil est coupé automatiquement.
Le nébuliseur n'est pas connecté à l'unité de commande :	le bouton marche/arrêt clignote trois fois (orange)	L'appareil est coupé automatiquement.
La durée de fonctionnement max. de 15 minutes est dépassée :	le bouton marche/arrêt clignote trois fois (vert)	1 bip. L'appareil est coupé automatiquement.
Arrêt de l'appareil :	le bouton marche/arrêt s'éteint	1 bip.

Veiller à ce que la zone du connecteur du nébuliseur et l'unité de commande soit entièrement sèches avant chaque nouvelle utilisation sinon l'appareil ne pourra pas fonctionner correctement.

Si la séance dure plus longtemps que d'habitude, le tamis générateur d'aérosols pourrait être bouché. Le rincer avec le VELOXcare.



1

Nettoyage

Avant la première mise en service et après chaque utilisation :

- Placer le nébuliseur (démonté entièrement), l'embout buccal et le masque pendant 5 min. env. sous l'eau chaude du robinet eau avec un peu de produit de vaisselle.
- Rincer ensuite chaque pièce soigneusement sous l'eau courante.



2a

Rinçage du tamis générateur d'aérosols à l'aide du VELOXcare


Une fois par semaine pour séance de nébulisation quotidienne

Placer le réservoir des médicaments avec la cuve vers le bas (les ailettes bleues de la valve se trouvent en haut) dans le VELOXcare, rabattre et fermer les attaches.



2b

- Placer le VELOXcare sur l'unité de commande. Fermer l'attache sur le dessous de l'appareil.
- Verser 2,5 ml de solution saline isotonique ou d'eau distillée.

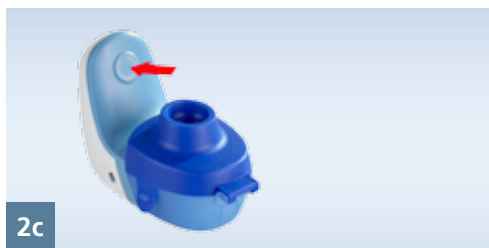

2c

- En cas de fonctionnement avec le bloc d'alimentation secteur, relier l'unité de commande avec le bloc d'alimentation secteur à la prise.
- Mettre le VELOX en marche. Un signal sonore retentit, le bouton marche/arrêt s'allume (vert).
- Le rinçage est en cours.



2d

- Lorsque le liquide de lavage a fini de s'écouler, arrêter l'appareil.
- Un signal sonore retentit, le bouton marche/arrêt s'éteint.
- Retirer le VELOXcare de l'unité de commande.
- Retirer le réservoir des médicaments, rincer ce dernier et le VELOXcare soigneusement sous l'eau du robinet.



3

Désinfection

Une fois par semaine à l'issue du nettoyage

- Dans de l'eau distillée en ébullition (au min. 5 mn)

Ou

- Dans un désinfecteur à vapeur, par ex. pour biberons (au min. 6 mn)



4

Séchage

Après chaque nettoyage et/ou désinfection, placer les pièces sur une surface sèche, propre et absorbante et les laisser sécher complètement.



5

Stockage

Conserver les pièces dans un endroit sec, à l'abri de la poussière.



6

Durée de vie du nébuliseur :

Le nébuliseur est conçu pour 365 applications et 52 désinfections

